



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Metodické pokyny

Metodické pokyny ohledně odběru, zasílání a vyšetření vzorků pro terénní laboratoře.

### NRL pro enteroviry

- [Popis](#)
- [Pracovníci](#)
- [Publikace CEM](#)
- [Programy surveillance](#)
- [Nabídka služeb](#)
- [Metodické pokyny](#)

### Způsob odběru:

**Sledování případů akutních chabých paréz** - 4-8 gramů stolice ( velikosti nehtu na palci) odebraných in toto nebo rektální rourkou vložit do čistého kontejneru se šroubovacím uzávěrem (vzorky stolice od dětí se dají získat z plenek, případně konečníku). Pokud vzorky stolic nejsou okamžitě odvezeny do NRL, je nutné je zmrazit a kdykoli odvézt ve zmraženém stavu do NRL.

**Sledování enterovirů v odpadních vodách** - z hlavní městské kanalizace před čističkou odpadních vod. Z jednoho místa proudící odpadní vody se odebere 5 vzorků vody zhruba 30 cm pod hladinou a vlijí se do vymyté plastové nesterilní láhve o objemu 1 litr. Takto odebraná odpadní voda se uchovává při 2-8 C před transportem do NRL.

### Zasílání materiálu

NRL pro enteroviry, SZÚ, CEM, Šrobárova 48, 100 42 PRAHA 10 ( vyšetření na polioviry a další enteroviry je bezplatné).

[Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry - odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry \(225,62 KB\)](#)

### Doporučené postupy vyšetření

Vyšetření enterovirů : kit Geneproof

Sérologie enterovirů : kit VIROTECH (N)



Sérologie enterovirů, hantavirů, SARS-CoV2: kit EUROIMMUN (N)