



Vyhlášení EHK-891 Sérologie Herpes simplex viru

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy nebo infekční séra. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Zásilka obsahuje 2 vzorky séra/citrátové plazmy v množství 0,3 ml na stanovení protilátek proti viru HSV (u laboratoří, které požádaly o vyšší objem - 0,5ml). Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě -18°C a nižší, krátkodobě 2 - 8 °C) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna 0,02% azidem sodným.

Vzorky byly připraveny v Národní referenční laboratoři pro herpetické viry Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ,

Vyhodnocení:

Výsledky ze zúčastněných laboratoří se porovnávají s výsledky získanými v NRL pro herpetické viry. Každý otestovaný marker má hodnotu POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ, přípustná je také hodnota HRANIČNÍ.

Hodnocení je založeno na ohodnocení každého shodného výsledku sledovaného markeru v jednom vzorku přidělením dvou bodů. V případě částečné neshody (obvykle hraniční výsledek) je přidělen jeden bod. Hranici úspěšnosti pro jednotlivé kolo dané série nelze stanovit předem, neboť záleží na míře shody hodnocené laboratoře s NRL a zároveň na míře shody mezi zúčastněnými laboratořemi dohromady.

Prosím o celkovou interpretaci nálezu - vyplňuje se do okénka " Komentář". Zde také můžete uvést připomínky / náměty k podobě elektronického formuláře EHK Lab. Dále prosím, pokud diagnostická souprava, kterou používáte, není uvedena ve formuláři, uveďte její název do okénka " Komentář", aby v příštím kole mohla již být zahrnuta do formuláře.

Výsledky odešlete pomocí software EHK Lab na adresu AP CEM (ehkherpes@szu.cz, na tuto adresu odesílá program EHK Lab automaticky), nejpozději do 9.6. 2015.

!! K odeslání výsledků je nutno nainstalovat novou verzi elektronického formuláře EHK Lab!!

Program EHK Lab lze bezplatně stáhnout na adrese <http://www1.szu.cz/cem/ehklab/index.htm> (podrobnosti a návod na této adrese). **Výsledky odeslané starou verzí programu již nepůjdou zpracovat!**

Výsledky NRL pro herpetické viry budou uveřejněny 10 dní po uzávěrce kola na webových stránkách SZÚ v sekci Home >> [Mezilaboratorní porovnávání](#) >> [Programy způsobilosti pro mikrobiologické...](#) >>



[Akreditační pracoviště CEM \(AP CEM\)](#) >> [Externí hodnocení kvality \(EHK\) - výsledky](#) >> [EHK za rok 2015](#) >> [Očekávané výsledky EHK-891](#)

Žádáme naléhavě o dodržení termínu odevzdání. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.