



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2017, EHK - 956

Mykobakterie - průkaz metabolickými metodami

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. Je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe! O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

Během transportu je zajištěna stabilita vzorku kultivačním a transportním médiem.

V zájmu zachování anonymity hodnocení a prezentování výsledků neuvádějte při hlášení výsledků svou adresu, ani jméno pracovníka.

Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiložených formulářích doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje 5 vzorků materiálu k průkazu mykobakterií metabolickými metodami, případně k identifikaci izolovaných kmenů. Před dekontaminací vložte vzorky na několik hodin (nejlépe přes noc) do termostatu 37°C (ne do vyšší teploty), aby agar změknl.

Výsledky odečítejte průběžně a zaznamenejte je do přiložených formulářů. Pokud vaše laboratoř identifikaci mykobakterií neprovádí, kmeny již dále do příslušné regionální laboratoře nezasílejte.

Vzorky byly připraveny pracovníky Národní referenční laboratoře pro mykobakterie Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí MUDr. Ilona Zemanová, tel. 267 082 307.

„V případě prokazatelného závažného porušení správné laboratorní praxe (záměna vzorků, určení falešné pozitivita či falešné negativita) může garant EHK změnit hodnocení účastníka na „NEUSPĚLA“ i při nadlimitním počtu dosažených bodů z důvodu výrazného snížení limitu neúspěšnou/neúspěšných laboratoří.“

Protože nedílnou součástí průkazu metabolickými metodami je paralelní kultivace na Löwenstein-Jensenových (L-J) půdách, odešlete veškeré výsledky na adresu AP CEM právě až po odečtení výsledků na pevných L-J půdách, výsledek identifikace ihned po jejím ukončení, **nejpozději do 31.3.2017**. Pokud použijete automatizovaný detekční systém, doložte dobu odečtení pozitivních výsledků kopií záznamu z přístroje.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2017, EHK - 956

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
Mykobakterie - průkaz metabolickými metodami

Kód laboratoře:

Použitá dekontaminační metoda :

Použitý systém detekce :

Vzorek č.	Kód vzorku ^{*]}	Výsledek metabolické metody ^{#]}	Dny	Výsledek kultivace na L-J půdě ^{#]}	B O D Y ^{*]}
1					
2					
3					
4					
5					

^{*]} nevyplňujte

^{#]} pozitivní / negativní

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: MUDr. Ilona Zemanová

Podpis:

Dne:



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2017, EHK - 956

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
Mykobakterie – identifikace po průkazu metabolickými metodami

Kód laboratoře:

Číslo vzorku	Kód vzorku*1	V ý s l e d e k i d e n t i f i k a c e
1		
2		
3		
4		
5		

Číslo vzorku	Kód vzorku*1	S p r á v n ý v ý s l e d e k	B O D Y
1			
2			
3			
4			
5			
C e l k e m :			

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: MUDr. Ilona Zemanová

Podpis:

Dne: