



Státní zdravotní ústav  
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti  
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/11/2017, EHK - 965

## IDENTIFIKACE RESPIRAČNÍCH VIRŮ

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Výsledkový formulář pošlete poštou. **Formulář lze vyplnit ručně nebo na počítači (elektronickou podobu k vyplnění a následnému vytištění naleznete ve svém e-mailu).** Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje simulované klinické vzorky s obsahem respiračních virů (viry chřipky A, B, adenoviry, RSV) k určení virového agens. Použijte rychlé metody průkazu virového antigenu (ELISA, IF, PCR) anebo klasické metody izolace viru na tkáňových kulturách s určením virového agens podle vašich možností. Použité metody spolu s názvem (firmou) použitých komerčních setů a antigenů (sér) uveďte do přiloženého listu výsledkového protokolu. Zásilka obsahuje 4 vzorky. Stabilita vzorků během transportu je zajištěna lyofilizací.

Do rozpuštění uchovávejte lyofilizované vzorky při chladničkové teplotě (2 - 8°C). Před testováním vzorky rozpustíte v 1,5 ml sterilní destilované vody, důkladně protřepejte a vyšetřete jako běžný klinický materiál. Po rozpuštění vzorky uchovávejte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (-18°C a nižší).

Vzorky byly připraveny kolektivem pracovníků virologických laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ pod vedením MUDr. Radomíry Limberkové, tel. 267 082 412.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

**Výsledky odešlete na adresu AP CEM nejpozději do 11.4.2017.**

Výsledky NRL budou uveřejněny 10 dní po uzávěrce kola na webových stránkách SZÚ v *sekci Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro ... » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) » Externí hodnocení kvality (EHK) - výsledky » Očekávané výsledky EHK-965*

MUDr. Barbora Macková  
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)  
tel. 267 082 427  
email: apcem@szu.cz



**Státní zdravotní ústav**  
**Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti**  
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA  
podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady

