



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/23/2017, EHK - 977

## Mykologická diagnostika

Vzorky obsahují infekční klinický materiál. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. Výsledky pošlete na přiloženém formuláři doporučeně poštou. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 5 lyofilizovaných **biologických materiálů** k mykologické kultivaci a identifikaci zde přítomných kmenů kvasinkovitých mikroorganismů. Vzorky uložte při teplotě 2 – 8 °C a všechny zpracujte jako běžné klinické vzorky. **U vzorku č. 5** proveďte test citlivosti na antimykotika **flukonazol** a **vorikonazol**. Stabilita vzorků během transportu je zabezpečena vlastním zpracováním (lyofilizace).

Vzorky byly připraveny pracovníky OKM-Laboratoře lékařské mykologie vedené MUDr. K. Menclem, CSc., Pardubická nemocnice, 53203 Pardubice, tel: 466 013 211. Vzorky jsou distribuovány v zapertlovaných nádobkách. Po otevření nádoby rozpustíte lyofilizát v 1 ml sterilního fyziol. roztoku a po 1 až 2 minutách vyočkujte na pevnou Sabouraudovu půdu, případně jiné půdy, které používáte pro mykologickou diagnostiku. Použijte dvě vyočkování, z nichž jedno inkubujte při teplotě 37°C a druhé při teplotě 25°C.

**Výsledky odešlete na adresu AP CEM, nejpozději do 30. 5. 2017.**

Vzhledem k tomu, že některé kmeny rostou pomaleji (vzhledem k jejich lyofilizaci), je potřeba vzorky po obdržení okamžitě zpracovat.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

### **POZNÁMKA:**

***Při vyplňování výsledkového listu věnujte, prosím, pozornost také vyplnění tabulky (na zadní straně protokolu) týkající se identifikačních postupů používaných ve vaší laboratoři, zvláště těch, které použijete pro stanovení citlivosti k ATM.***

MUDr. Barbora Macková  
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)  
tel. 267 082 427



email: apcem@szu.cz

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/23/2017, EHK - 977

## VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Mykologická diagnostika

KÓD LABORATOŘE

Datum příjmu vzorků:

ČÍSLO VZORKU	DRUH MIKROORGANISMU	SPRÁVNÝ VÝSLEDEK (NEVYPLŇUJTE !)	BODY
1			
2			
3			
4			
5	identifikace kmene:		
	<b>flukonazol:</b>		
	naměřená hodnota	interpretace	
	<b>vorikonazol:</b>		
	naměřená hodnota	interpretace	

CELKEM BODŮ:

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:



Hodnotitel: MUDr. Karel Mencl, CSc. Podpis:  
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY  
977

Dne:  
PT#M/23/2017, EHK -

## Mykologická diagnostika

### Legenda k jednotlivým biologickým materiálům:

1. Sputum (Dg. C343)
2. Stěr z bukální sliznice (Dg. K122)
3. Výtěr z ucha (Dg. H603)
4. Moč (Dg. R31)
5. Konec venózního katétru (Dg. I743)

### Prosíme, uveďte údaje o použitých diagnostických metodách:

POSTUP IDENTIFIKACE KVASINEK		
typ testu	výrobce	č.šarže

POSTUP DETEKCE CITLIVOSTI K ATM		
typ testu	výrobce	č.šarže

Vyplnil (parafa): .....

Poznámky laboratoře: