



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
980

PT#M/25/2017, EHK -

Sérologie *Yersinia enterocolitica*

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři doporučeně. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

S ohledem na možnosti a rozmanitost používaných metod jsou v rámci EHK hodnoceny **pouze kvalitativní ukazatele** celkové a dle jednotlivých izotypů imunoglobulinů (viz výsledkový protokol).

Zásilka obsahuje **2 vzorky sér (a 250µl)**, určených ke zjištění protilátek proti *Yersinia enterocolitica*.

1. Před vlastním použitím lahvičku vytemperujte na teplotu +15 až +25°C
2. Materiál jemně promíchejte tak, aby se předešlo tvorbě pěny.
3. Uzavřený kontrolní materiál uchovávejte při teplotě +2 až +8°C
4. Stabilita vzorků je během transportu zajištěna ošetřením konzervačním činidlem (azid sodný a merthiolát)

Hodnocení je prováděno na základě konsenzuálního výsledku. Maximální počet bodů - 6 (za každý správný požadovaný výsledek 1 bod). Při použití metody hodnotící vzorek pouze celkové Ig (blot apod., za správný výsledek 3 body, případně podmíněně správný- 1 bod.

Vzorky připravila RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, tel. 495 832 607.

Výsledky odešlete na adresu AP CEM, nejpozději do 13. 6. 2017

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK nezúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať můžeme danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
980

PT#M/25/2017, EHK -

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie *Yersinia enterocolitica*

KÓD
LABORATOŘE

BODY

Datum příjmu vzorků:

Číslo vzorku	Vzorek 1			Vzorek 2		
Kód vzorku *)						
Kvalitativní hodnocení (celk. Ig, pozitivní, negativní nebo hraniční)						
Body						
izotyp	IgG	IgA	IgM	IgG	IgA	IgM
Kvalitativní hodnocení P, N, HR **)						
Body						

*) nevyplňujte

**) uveďte vaše hodnocení v případě, kdy vyšetřujete přítomnost protilátek v izotypech imunoglobulinů (P, N, HR)

Prosíme, uveďte názvy použitých souprav, čísla šarží, expiraci. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků:

Komentář k hodnocení:



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC
17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



Hodnotitel: RNDr. Marcela Drahošová

Podpis:

Dne: