



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA
Podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/5-1/2018, EHK – 1004V

Bakteriologická diagnostika - veterináři

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka zákonů č. 361/2007). Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři (pro urychlení odeslání výsledků můžete výsledky předběžně odfaxovat na číslo: 26708 2920). Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje dva vzorky určené k vyšetření citlivosti k předepsaným antimikrobním látkám. Vzorky uložte při teplotě 2 – 8 °C. Stabilita vzorků během transportu je zabezpečena vlastním zpracováním (lyofilizace).

Vzorky byly připraveny pracovníky NRL Česká národní sbírka typových kultur Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí Mgr. Renáta Šafránková, tel. 267 082 428. Vzorky jsou distribuovány v zapertovaných nádobkách. Po otevření nádobky rozpust'te lyofilizát v 1 ml živného bujónu a po 1 až 2 minutách vyočkejte na pevnou půdu. Pracujte až s kulturou po jedné pasáži.

Výsledky musí být odeslány nejpozději do 20. 3. 2018. Žádáme naléhavě o dodržení termínu.

Na internetových stránkách SZÚ na adrese:

<http://www.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore> naleznete po vyhodnocení série kromě průvodního dopisu také závěrečnou zprávu. Její přílohu, tj. ohodnocený výsledkový protokol, obdržíte jako dosud analogově s originální signaturou na Vaší kontaktní adresu. **Závěrečná zpráva bude uveřejněna již pouze v elektronické podobě!** Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy stáhnout a vytisknout.

Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím AP CEM. Zde Vám též zodpovíme Vaše případné dotazy.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)
tel. 267 082 258
email: apcem@szu.cz



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA
Podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/5-1/2018, EHK – 1004V

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
Bakteriologická diagnostika - veterináři

Datum příjmu vzorků :

KÓD LABORATOŘE

VYŠETŘETE CITLIVOST K ANTIBIOTIKŮM

(v interpretaci uveďte **C** nebo **R**, vyplňte jen silně orámované části!)

VZOREK 1: <i>Kingella kingae</i>	Interpretace	Body	Celkem
Erytromycin			
Tetracyklin			

VYŠETŘETE CITLIVOST K ANTIBIOTIKŮM

(v interpretaci uveďte **C** nebo **R**, vyplňte jen silně orámované části!)

VZOREK 2: <i>Plesiomonas shigelloides</i>	Interpretace	Body	Celkem
Chloramfenikol			
Tetracyklin			

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :