



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
1025

PT#M/24/2018, EHK -

Sérologie *Helicobacter Pylori*

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 4 x 250 μ l vzorků sér, určených ke zjištění protilátek proti *Helicobacter pylori*

Před vlastním použitím lahvičku vytemperujte na teplotu +15 až +25 $^{\circ}$ C

Materiál jemně promíchejte tak, aby se předešlo tvorbě pěny.

Uzavřený kontrolní materiál uchovávejte při teplotě +2 až + 8 $^{\circ}$ C

Stabilita vzorků je během transportu zajištěna konzervačními činidly (azid sodný a merthiolát)

Hodnocení je prováděno na základě konsenzuálního výsledku. Vzhledem k velké rozmanitosti používaných souprav a detekčních systémů, které hodnotí výsledek různým způsobem (titr, index, absorbance, jednotky apod.) je hodnocení kvantitativních výsledků nemožné. Hodnocení kvalitativních výsledků - maximální počet bodů 8, za každý správný výsledek 2 body (případně podmíněně správný - 1 bod.).

Vzorky připravila RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, tel. 495 832 607.

Výsledky musí být odeslány nejpozději do 12. 6. 2018. Žádáme naléhavě o dodržení termínu. Očekávané výsledky budou uveřejněny 10 dnů poté na internetových stránkách SZÚ na adrese: <http://www.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore>. Zde naleznete také tento průvodní dopis a další dokumenty k sérii. Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy stáhnout a vytisknout.

Po vyhodnocení série bude na stejném místě uveřejněna závěrečná zpráva. Přílohu, tj. ohodnocený výsledkový protokol, obdržíte jako dosud analogově s originální signaturou na Vaší kontaktní adresu. **Závěrečná zpráva bude uveřejněna již pouze v elektronické podobě!**

Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím AP CEM. Zde Vám též zodpovíme Vaše případné dotazy.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)
tel. 267 082 258



email: apcem@szu.cz

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
1025

PT#M/24/2018, EHK -

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie *Helicobacter pylori*

KÓD
LABORATOŘE

BODY:

Datum příjmu vzorků:

Číslo vzorku	vzorek 1	vzorek 2	vzorek 3	vzorek 4
Kód vzorku)				
IgG kvalitativní				
IgA kvalitativní				
Body				

*) nevyplňujte

Prosíme uveďte názvy použitých souprav, čísla šarží a metodu stanovení, popřípadě stručně popište postup. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC
17043, reg. č. 7001
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady



Hodnotitel: RNDr. Marcela Drahošová

Podpis:

Dne: