



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2018, EHK - 1001

Mykobakterie - průkaz metabolickými metodami

Vzorky obsahují patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. **Během transportu je zajištěna stabilita vzorku kultivačním a transportním médiem.**

V zájmu zachování anonymity hodnocení a prezentování výsledků neuvádějte při hlášení výsledků svou adresu, ani jméno pracovníka.

Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky posílejte na přiložených formulářích. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje 5 vzorků materiálu k průkazu mykobakterií metabolickými metodami, případně k identifikaci izolovaných kmenů. Před dekontaminací vložte vzorky na několik hodin (nejlépe přes noc) do termostatu 37°C (ne do vyšší teploty), aby agar změknl.

Výsledky odečítejte průběžně a zaznamenejte je do přiložených formulářů. Pokud vaše laboratoř identifikaci mykobakterií neprovádí, kmeny již dále do příslušné regionální laboratoře nezasílejte.

Vzorky byly připraveny pracovníky Národní referenční laboratoře pro mykobakterie Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, vedoucí MUDr. Ilona Zemanová, tel. 267 082 307.

„V případě prokazatelného závažného porušení správné laboratorní praxe (záměna vzorků, určení falešné pozitivita či falešné negativita) může garant EHK změnit hodnocení účastníka na „NEUSPĚLA“ i při nadlimitním počtu dosažených bodů z důvodu výrazného snížení limitu neúspěšnou/neúspěšných laboratoří.“

Protože nedílnou součástí průkazu metabolickými metodami je paralelní kultivace na Löwenstein-Jensenových (L-J) půdách, odešlete veškeré výsledky na adresu AP CEM právě až po odečtení výsledků na pevných L-J půdách, výsledek identifikace ihned po jejím ukončení, **nejpozději do 27. 3. 2018**. Pokud použijete automatizovaný detekční systém, doložte dobu odečtení pozitivních výsledků kopií záznamu z přístroje.

Očekávané výsledky budou uveřejněny 10 dní po uzávěrce kola na webových stránkách SZÚ v *sekcí » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii » Aktuality*.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2018, EHK - 1001

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
Mykobakterie - průkaz metabolickými metodami

Kód laboratoře:

Použitá dekontaminační metoda :

Použitý systém detekce :

Vzorek č.	Kód vzorku ^{*1]}	Výsledek metabolické metody ^{#1]}	Dny	Výsledek kultivace na L-J půdě ^{#1]}	B O D Y ^{*1]}
1					
2					
3					
4					
5					

^{*1]} nevyplňujte

^{#1]} pozitivní / negativní

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: MUDr. Ilona Zemanová

Podpis:

Dne:



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/2/2018, EHK - 1001

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL
Mykobakterie – identifikace po průkazu metabolickými metodami

Kód laboratoře:

Číslo vzorku	Kód vzorku ^{*1}	V ý s l e d e k i d e n t i f i k a c e
1		
2		
3		
4		
5		

Číslo vzorku	Kód vzorku ^{*1}	S p r á v n ý v ý s l e d e k	B O D Y
1			
2			
3			
4			
5			
C e l k e m :			

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: MUDr. Ilona Zemanová

Podpis:

Dne: